

RobinMedical

Justerbar luftmadrass
med övertrycksventil.



Tryckavlastning

RobinMedical har en unik design med speciellt utformade luftkamarer som ger stöd och tryckavlastning. Pumpen ger möjlighet att ställa in madrassen till den perfekta fastheten för att fördela patientens kroppsvikt jämnt vid liggläge.

Inställning

Det är lätt att reglera/justera madrassen med hjälp av handkontrollen när patienten ligger på madrassen. Från en mjuk yta som är komfortabel och ger stöd, till en fast yta vid behandling eller när patienten ska kliva i eller ur sängen.

Patienter med smärta eller trycksår rekommenderas att reglera lufttrycket regelbundet.

Pumpen

Pumpen är elektrisk och har en tryckanvisning på handkontrollen som visar madrassens fasthet. Varje patient kan enkelt hitta sitt nummer mellan 5-50 som representerar deras idealiska kombination mellan komfort, fasthet och stöd.

Pumpen har också en egen CSL-knapp som automatiskt reglerar tillbaka madrassens tryck till patientens ideala lufttryck. Det gör det lättare för både patienter och personal när man vill återställa madrassen efter att trycket t.ex. ökats när man ska flytta patienten. Pumpen drar endast ström när den används vid justeringar.

Överdrag

Materialet är gjort i Polyester/ Polyurethane.

Det består av töjbart PES-trikå, är vattentätt, resistent mot bakterier och virus och är flamsäkert.

Tvättas i 95 C°, kan torktumlas, kemtvättas, steriliseras med ånga; klarar blod, urin, olja, fett och desinfektionsmedel.

Färg: Himmelsblå

Överdraget är i två delar så du kan enkelt avlägsna det övre för rengöring.

Storlekar

80/85/90 cm x 200 cm.

Robin Medical kan användas i sjukhussängar.

Robin Medical kan användas av patienter upp till 340kg.

Användningsgrupp:

- lättare liggsår
- förebygga liggsår
- underlättar att behandla och flytta patienter
- vid smärta

Reservdelar

RobinMedical levereras i flera delar, så det är lätt att transportera och förvara. Detta är också fördelaktigt då man kan byta ut enskilda delar av madrassen vid behov.

DISTRUBITÖR:

Merivaara AB
Karlsbodavägen 41,
Box 20126 161 02 Bromma
Tel. 08-627 29 50 Fax. 08-627 29 55
e-mail : info@merivara.se

PRODUCENT:

Bedtime as
Karoline Kristiansensvei 4,0661 Oslo
Tel. 67111080, Fax. 67111081
e-mail: info@bedtime.no

